

Technisches Datenblatt

Safetouch Masken Typ I / II / IIR

Medizinische Gesichtsmasken gemäß DIN EN 14683 Typ I, II und IIR



Produktbeschreibung

Bei medizinischen Gesichtsmasken, Mund-Nasen-Schutz (MNS), oft auch OP-Masken genannt, handelt es sich um Einmalprodukte, die normalerweise im Klinikalltag oder in Arztpraxen verwendet werden. Sie bestehen aus speziellen Kunststoffen und sind mehrschichtig aufgebaut.

Material

3-lagiger SMS Aufbau: Spinnvlies – Meltblown – Spinnvlies

Zertifizierungen

CE- Zertifizierung: Entspricht den Anforderungen der EN 14683:2019+AC:2019.

Medical Devices Directive 93/42/ECC

Verwendungszweck

Fremdschutz: Schützen das Gegenüber vor der Exposition mit Tröpfchen, die möglicherweise infektiös sind. Schützen den Träger der Maske nur begrenzt, da dieser nicht nur durch den Filtervlies einatmet, sondern auch Atemluft an den Rändern des MNS vorbei angesogen wird □ kaum Schutz vor erregerehaltigen Aerosolen. MNS können den Träger aber im Bereich der Mund- und Nasen- partie vor dem direkten Auftreffen von Tröpfchen schützen sowie das Anfassen des Bereichs mit den Händen verhindern





Gebrauchsanweisung

1. Bevor Sie die Maske anlegen waschen Sie sich bitte mindestens 20 Sekunden lang mit Seife die Hände.
2. Die Maske wird so platziert, dass sie Nase, Mund und Kinn vollständig bedeckt
3. Die Maske übers Kinn stülpen und über den Mund an die Nase drücken.
4. Das Band an den Ohren befestigen.
5. Durch druck mit beiden Zeigefingern den Nasenbügel fest auf die Nase drücken.
6. Ersetzen Sie Ihre Maske immer, wenn sie während des Gebrauchs angefeuchtet, zerrissen oder verschmutzt ist.
7. Nehmen Sie Ihre Maske ab, indem Sie das Gummi festhalten.
8. Sie ist ein Einwegartikel.

Abbildung



Seite 2 von 2



P&S Handels GmbH
Auf der Gemarkte 1
40625 Düsseldorf
+49 211 29362345



CEO Samir Mehmedagic
T: +49 163 75 98 265
www.ps-handel.com
info@ps-handel.com



Volksbank Düsseldorf Neuss eG |
Königsallee 98a, 40215 Düsseldorf
IBAN: DE75 3016 0213 0056 9360 17
BIC: GENODED1DNE



Steuer-Nr: 103/5753/3212 |
USt-Id: DE332844604
EORI: DE 4500 6765 9584 248
HRB 90321, AG Düsseldorf