

GEBRAUCHSANWEISUNG

Einweg-Kittel - Stufe 2

Verwendungszweck

Die Kittel können zum Beispiel als persönliche Schutzausrüstung, im Gesundheitswesen verwendet werden. Sie werden verwendet, um den Träger vor der Ausbreitung von Infektionen oder Krankheiten zu schützen, wenn der Träger mit potenziell infektiösem flüssigem und festem Material in Kontakt kommt. Sie können auch verwendet werden, um zu verhindern, dass der Kittelträger Mikroorganismen überträgt, die gefährdeten Patienten, wie z. B. Patienten mit geschwächtem Immunsystem, schaden könnten. Kittel sind ein Teil einer umfassenden Strategie zur Infektionskontrolle.

Stufe 2: Geringes Risiko, zum Beispiel bei der Blutentnahme, beim Nähen, auf der Intensivstation oder in einem Pathologielabor

- Wird in Situationen mit geringem Risiko verwendet
- Bietet eine Barriere gegen das Eindringen größerer Mengen von Flüssigkeit durch Spritzer und eine gewisse Flüssigkeitsbelastung durch Einweichen
- Anwendbarkeit: Blutentnahme aus einer Vene, Naht, Intensivstation, Pathologielabor

Kontraindikationen

KEINE BEKANNT

Sicherheitstipps

- Wenn sich an den Kitteln Löcher oder Risse befinden, verwenden Sie diese nicht und entsorgen Sie sie.
- Wenn die Haltbarkeit abgelaufen ist, sollten keine Kleider verwendet werden.

Lager

Wir empfehlen Lagerbedingungen unter 20 ° C. Nicht nach Ablaufdatum verwenden.

Grafische Symbole

 <p>Halten Sie zwischen 5 und 35 Grad Celsius</p>	 <p>Chargennummer</p>	 <p>Hersteller</p>	 <p>Zertifizierungen</p>
 <p>Verfallsdatum</p>	 <p>Herstellungsdatum</p>	 <p>Verwenden Sie den Inhalt nicht falls das Paket beschädigt ist</p>	 <p>Nicht wiederverwenden</p>
SKU-Modell Katalognummer		 <p>Nicht waschen</p>	

Hergestellt durch:

INTEGRAS SAVUNMA VE MEDİKAL A.Ş.
Mutlukent Mah. 2001 Sokak No:2 Cankaya, Ankara, TURKEY
Loxtay is the registered Trademark of Integras.
All Rights Reserved Copyright © 2020

Importiert und vertrieben durch:

P&S Handels GmbH
Auf der Gemarkung 1
40625 Düsseldorf