



P&S Handels GmbH FFP2 Maske SECUREX

Technische Daten

Artikelbezeichnung	FFP2 Maske SECUREX
Artikelnummer	600904
Farbvarianten	Weiß
Nasenclip	Vorhanden
Einzelgewicht	ca. 4,20 g
Lagen	3 x Doppellage (wie 6 herkömmliche Lagen)
Zusammensetzung	Nanofaser Nonvoven
Filterwirkung	FFP2 lt. Zertifikat/Prüfbericht
Zertifizierung	Geprüft und zugelassen mit CE-Zeichen gemäß DIN EN149:2001+A1:2009 Notified Body CE 2163


Logistische Daten

Kartonmaße	51x41x41 cm
Kartoninhalt	24 Boxen à 50 Stück einzeln verpackt im Polybeutel
Palette	16 Kartons / 19.200 Stk.

1 Stück (Einzelverpackung)



50 Stück (1 Box)

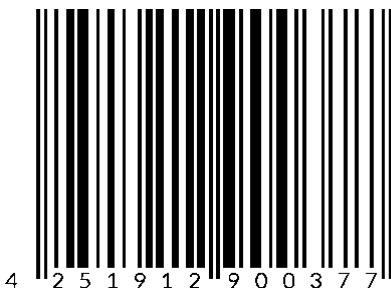

1200 Stück (1 Karton)



P&S Handels GmbH
Auf der Gemarke 1
40625 Düsseldorf
+49 211 29362345



CEO Samir Mehmedagic
T: +49 163 75 98 265
www.ps-handel.com
info@ps-handel.com



Volksbank Düsseldorf Neuss eG |
Königsallee 98a, 40215 Düsseldorf
IBAN: DE75 3016 0213 0056 9360 17
BIC: GENODED1DNE





Steuer-Nr: 103/5753/3212 |
USt-Id: DE332844604
EORI: DE 4500 6765 9584 248
HRB 90321, AG Düsseldorf





Verpackung

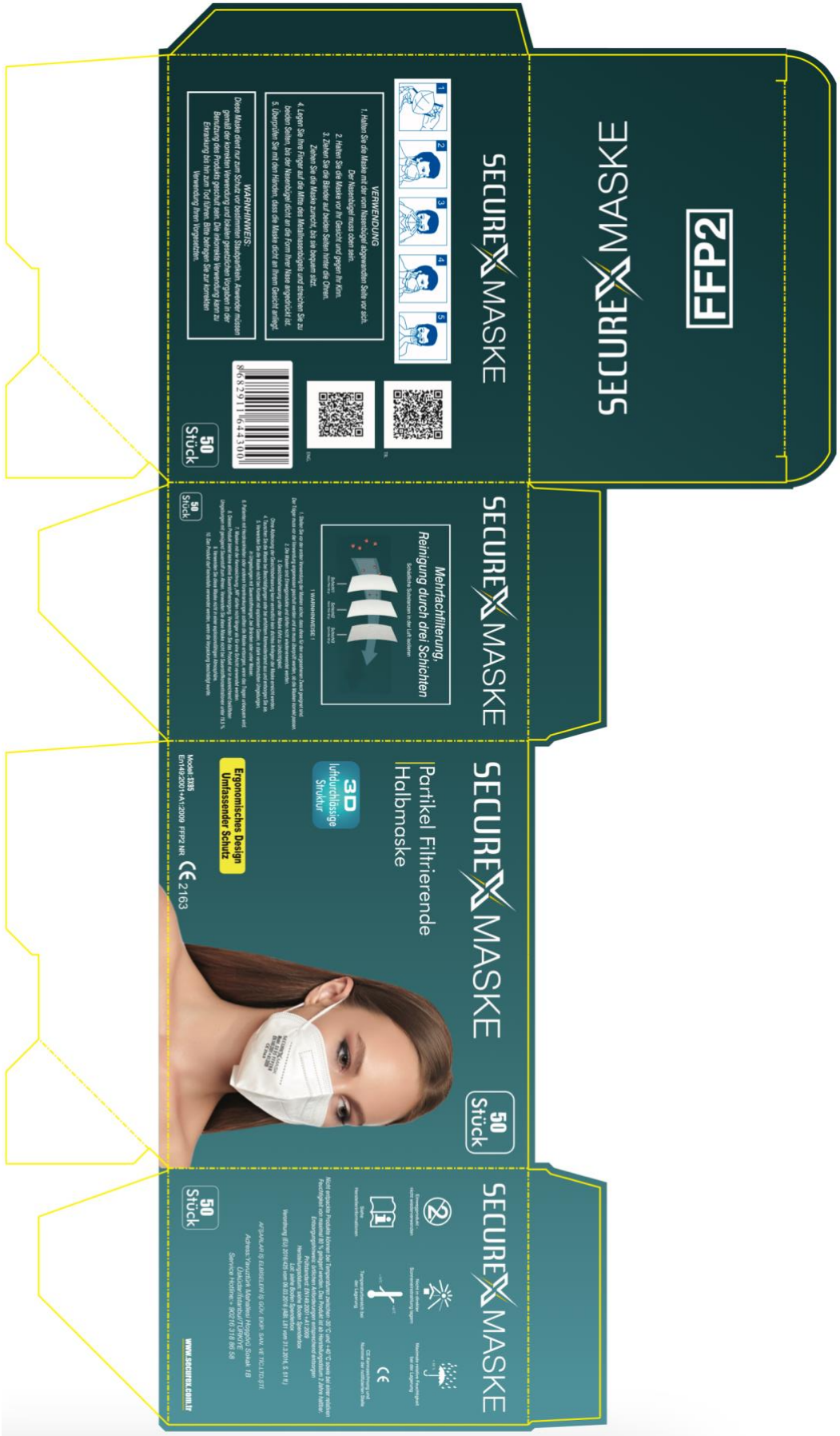

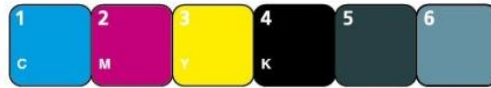

21 cm

1 cm

1 cm

1.5 cm

5.75 cm

11.5 cm

26 cm

5.75 cm

1.5 cm



Nicht empackte Produkte können bei Temperaturen zwischen -30 °C und +40 °C sowie bei einer relativen Feuchtigkeit von maximal 80 % gelagert werden. Das Produkt ist ab Herstellungsdatum 2 Jahre haltbar. Entsorgungshinweis: örtlichen Anforderungen entsprechend entsorgen. Prüfstandard: EN149:2001+A1:2009 Herstellungsdatum: siehe Boden Spenderbox Lt.: siehe Boden Spenderbox Verordnung (EU) 2016/425 vom 09.03.2016 (ABl. L81 vom 31.3.2016, S. 51 ff.) AFSARLAR İŞ ELBİSELERİ İŞ GÜV. EKİP. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Adres: Yavuztürk Mahallesi Hoşgörü Sokak 1B Üsküdar/istanbul/TÜRKİYE Service Hotline: + 90216 318 86 58 EU Eintraher: P&S Handels GmbH, Auf der Gemarke 1 40625 Düsseldorf www.ps-handel.com - Tel: +49 211 29362345 - Das Verfallsdatum: 01/2023



ENG



TR

SECUREX MASKE

www.securex.com.tr

Partikel Filtrierende
Halbmaske

3D
luftdurchlässige
Struktur FFP2

Ergonomisches Design
Umfassender Schutz

Model: SX95
En149:2001+A1:2009 FFP2 NR 2163



! WARNHINWEISE ! 1. Stellen Sie vor der ersten Verwendung der Masken sicher, dass diese für den vorgesehenen Zweck geeignet sind. Der Träger muss vor der Verwendung angemessen geschult werden und es muss überprüft werden, ob die Masken korrekt passen. 2. Die Masken sind Einwegprodukte und dürfen nicht wiederverwendet werden. 3. Gesichtshaarung unter der Maske führt zu Undichtigkeit. Ohne Abdeckung der Gesichtshaarung kann vermutlich kein dichtes Anliegen der Maske erreicht werden. 4. Tauschen Sie die Maske bei Beschädigungen oder bei erhöhtem Atemwiderstand aus und entsorgen Sie sie. 5. Verwenden Sie die Maske nicht bei Kontakt mit explosiven Gasen, in stark verschmutzten Umgebungen, in Umgebungen mit Sauerstoffmangel, bei Bränden oder unter Wasser. 6. Patienten mit Herzkrankheiten oder anderen Vorerkrankungen sollten die Maske entsorgen, wenn das Tragen unbequem wird. 7. Masken mit der Kennzeichnung „NR“ dürfen nicht länger als für eine Schicht verwendet werden. 8. Dieses Produkt bietet keine aktive Sauerstoffversorgung. Verwenden Sie das Produkt nur in ausreichend belüfteten Umgebungen mit genügend Sauerstoff zum Atmen. Verwenden Sie diese Maske nicht bei Sauerstoffkonzentrationen unter 19,5 %. 9. Verwenden Sie diese Maske nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre. 10. Das Produkt darf keinesfalls verwendet werden, wenn die Verpackung beschädigt wurde.

VERWENDUNG
1. Halten Sie die Maske mit der vom Nasenbügel abgewandten Seite vor sich. Der Nasenbügel muss oben sein.
2. Halten Sie die Maske vor Ihr Gesicht und gegen Ihr Kinn.
3. Ziehen Sie die Bänder auf beiden Seiten hinter die Ohren.
Ziehen Sie die Maske zurück, bis sie bequem sitzt.
4. Legen Sie Ihre Finger auf die Mitte des Metallnasenbügels und streichen Sie zu beiden Seiten, bis der Nasenbügel dicht an die Form Ihrer Nase angepasst ist.
5. Überprüfen Sie mit den Händen, dass die Maske dicht an Ihrem Gesicht anliegt.

WARNHINWEIS:
Diese Maske dient nur zum Schutz vor bestimmten Staubpartikeln. Anwender müssen gemäß der korrekten Verwendung und strikten persönlichen Hygiene in der Benutzung des Produkts geschult sein. Die intentionale Verwendung kann zu Entzündung bis hin zum Tod führen. Bitte befolgen Sie zur korrekten Verwendung über Hinweisen.



Einwegprodukt - nicht wiederverwendbar



Bitte Handbuchs lesen



Stellen Sie die Maske an einem kühlen, trockenen Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.



Temperaturbereich bei der Lagerung: +5°C bis +25°C



Maximale relative Feuchtigkeit bei der Lagerung: < 90%



CE-Kennzeichnung und Nummer der registrierten Stelle

SECUREX MASK



Einwegprodukt -
nicht wiederverwenden



Nicht in direkter
Sonneneinstrahlung lagern



Maximale relative Feuchtigkeit
bei der Lagerung
< 80 %



Siehe
Herstellerinformationen



Temperaturbereich bei
der Lagerung
-30°C +40°C



CE-Kennzeichnung und
Nummer der notifizierten Stelle



Model: **SX95**
EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR  **2163**

Notified Body: UNIVERSAL UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.
 Adress: Tatlısu Mah. Arif Ay Sok. No:16 Umraniye / İstanbul / TÜRKİYE
 0532 755 9001 - 0216 455 80 80 (PBX) 0216 455 80 08 info@universalcert.com NB2163

EU Einführer: P&S Handels GmbH, Auf der Gemarkte 1 40625 Düsseldorf
 www.ps-Handel.com Tel:+49 211 29362345 Das Verfallsdatum: 01/2023

Gebrauchsanweisung - SECUREX – Schutzmaske Kategorie FFP2

Anleitung

Norm:

Dieses Produkt entspricht der Norm EN149:2001+ A1:2009 für Atemschutzgeräte - Halbmaske zur Filterung zum Schutz vor Partikeln. Diese Filtermasken sind gemäß der Verordnung der europäischen Kommission (EU) 2016/425 über PSA als Persönliche Schutzausrüstung in der Kategorie III eingestuft und entsprechend gekennzeichnet.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die SECUREX Maske ist als Kategorie FFP2 eingestuft. Sie schützt vor Partikeln, Nebel Rauch und Aerosolen auf Ölbasis. Die Verpackung schützt die Maske vor der Verwendung. Schützt wirksam vor Pollen. Die Maske kann nur zum persönlichen Schutz verwendet werden, nicht für medizinische Zwecke. Maske nicht bei der Brandbekämpfung und in explosionsgefährlichen Bereichen nutzen.

Dichstest

1. Bedecken Sie die Maske vorsichtig mit beiden Händen ohne den Dichstest zu verändern
2. Stark Ausatmen
3. Bei der Leckage im Nasenbereich den Nasenbügel neu anpassen. Dichstestprüfung wiederholen.
4. Bei der Leckage am Maskenrand den Sitz der Bänder überprüfen und anpassen. Dichstestprüfung wiederholen.

Wenn Sie keinen richtigen Dichstest erreichen können, betreten Sie nicht den Gefahrenbereich, Informieren Sie Ihre Vorgesetzten.

Warnung und Einschränkung

- Vergewissern Sie sich immer, dass das Produkt:
 - Geegnet ist für die Anwendung,
 - Korrekt angelegt ist,
 - während des gesamten Aufenthalts im Gefahrenbereich getragen wird
 - Ersetzt wird, wenn notwendig
- Richtige Auswahl, Schulung, Gebrauch und gegebenenfalls Reinigung sind die Voraussetzungen dafür, dass das Produkt den Anwender vor bestimmten luftgetragenen Gefahrstoffen schützt.
- Die Nichtbefolgung aller Anweisung zur Anwendung der Maske und / oder die Fehlbenutzung während des Aufenthalts im Gefahrenbereich kann die Gesundheit des Anwenders beeinträchtigen und zu schweren Erkrankungen oder Dauerschäden führen.
- Beachten Sie bei der Auswahl und richtigen Anwendung nationale Bestimmungen und alle mit gelieferten Informationen.
- Vor Gebrauch muss der Anwender, in über Einstimmung mit den nationalen Regeln in der Funktionsgerechten Handhabung geschult sein.
- Dieses Produkt schützt nicht vor Gasen und Dämpfen.
- Verwenden Sie die Maske nicht in Umgebungen mit weniger als 19,5 % Sauerstoff.

- Verwenden Sie die Maske nicht in Umgebung mit unbekanntem Gefahrstoffen oder Konzentrationen die die zulässigen Höchstwerte übersteigen.
- Verwenden Sie die Maske nicht, wenn Gesichtshaar im Bereich des Dichtrandes einen korrekten Dichstest der Maske verhindert.
- Verlassen Sie sofort den belasteten Bereich, wenn:
 - a) Das Atmen schwer fällt
 - b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten
 - c) Die Maske beschädigt wird
 - d) Geruch oder Geschmack des Gefahrstoffs oder eine Reizung auftritt
- Entsorgen und ersetzen Sie die Maske, wenn sie beschädigt ist, der Atemwiderstand stark erhöht ist oder am Ende einer Schicht.
- Die Maske darf niemals verändert oder repariert werden.

Die Maske ist zum einmaligen Gebrauch vorgesehen und ist danach entsprechend der nationalen Vorgabe zu entsorgen.

Transport und Lagerung

Die Partikelmasken haben eine Lagerdauer von 2 Jahren. Das Ende der Lagerdauer ist auf der Verpackung angegeben. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch immer, dass das Produkt noch innerhalb der Lagerdauer liegt. Das Produkt sollte sauber, trocken und im Temperaturbereich von +10 °C und +30 °C bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % gelagert werden. Für Lagerung und Transporte die Originalverpackung verwenden. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Verwendung

Aufsetzanleitung (siehe Abbildung 1)

Vergewissern Sie sich bevor sie die Maske aufsetzen, dass ihre Hände sauber sind und die Maske nicht beschädigt ist. Atemschutz ist nur dann wirksam, wenn er richtig ausgewählt, angepasst und während des gesamten Aufenthalts im Gefahrenbereich getragen wird.

1. Mit der Rückseite nach oben, entfalten Sie die Maske in dem sie die obere und untere Seite so auseinanderziehen, dass eine Schale entsteht. Nutzen Sie hierzu die Kinnlasche.
2. Formen Sie den Nasenbügel vor in dem Sie ihn in der Mitte leicht biegen.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Maske vollständig aufgeklappt ist.
4. Greifen Sie die Maske mit einer Hand, so dass die offene Seite zum Gesicht zeigt. Nehmen Sie eins der beiden Kopfbänder in die andere Hand. Setzen Sie die Maske mit dem Nasenbereich nach oben unterhalb des Kinns an und ziehen Sie die Haltebänder hinter die Ohren.
5. Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel ihrer Nasenform an, um einen guten und sicheren Sitz zu erreichen. Ausdrücken des Nasenbügel mit nur einer Hand könnte ein Knick und dadurch eine Undichtigkeit und geringere Wirksamkeit der Maske bewirken.
6. Der Dichstest, der Maske im Gesicht, sollte vor Betreten des Arbeitsplatzes überprüft werden.



UNIVERSAL

Verify the validity with the QR code



NB 2163

CERTIFICATE OF CONFORMANCE

Certificate No: 2163-PPE-1211/01

Respiratory protective devices, filtering half masks to protect against particles manufactured by

**Afşarlar İş Elbiseleri İş Güvenliği Ekipmanları
San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Yavuztürk Mah. Hoşgörür Sok No: 1B Üsküdar İstanbul / TURKEY

Continues to fulfil the requirements of

**EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory Protective Devices -
Filtering Half Masks to Protect Against Particles -
Requirements, Testing, Marking**

Based on the evaluation of test reports and internal quality control audit reports according to EN 149+A1:2009 and Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex VII (Module C2). This certificate implies that the manufactured products show below are in conformance with the approved EU Type Examination model and meets the requirements of the regulation.

Product Definition

Model	Class	EU Type Examination Certificate		
		Serial No	Date	Issuing NB No
SECUREX / SX95	FFP2 NR	2163-PPE-1211	05.08.2020	2163

Here by the manufacturer is allowed to use notified body number (2163) and can fix CE mark, as shown below, on the Category III product models given above, with;

- Issuing an appropriate EU Declaration of Conformity according to **Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Annex 9.**
- Taking all measures necessary so that the manufacturing process and its monitoring ensure the homogeneity of production and conformity of the manufactured PPE with the type described in the EU type examination certificate.

This certificate is issued on 12/10/2020 and will be valid for one year, until 11/10/2021 if the manufacturer makes no major change in the product designs and manufacturing processes affecting the product performance on the essential health and safety requirement.



Suat KACMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION
Director